


## Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-VITAL

Datenblatt-Nr.: 300904 / Stand: 2024/05/13

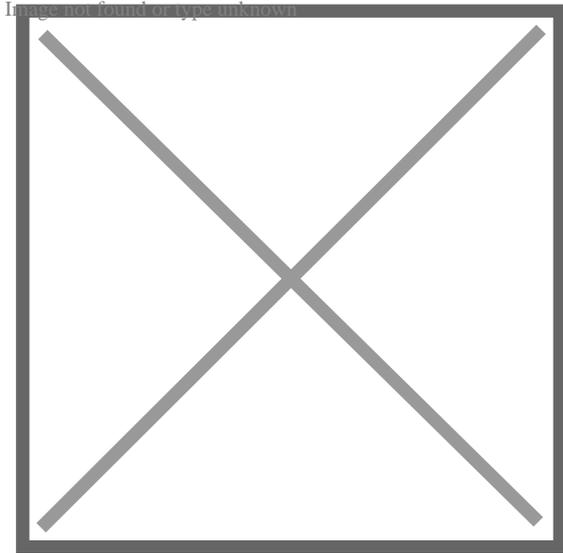

---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-VITAL

---

**Artikelnummer:** 300904

---

**Bezeichnung neu:** Systemsoftware IF-SW-VITAL

---

**Kurzbeschreibung neu:** IF-SW-VITAL

---

**Bezeichnung alt:** Software für Vitalfunktion

---

**Kurzbeschreibung alt:** SOFT-VITAL-P7

---

**Verwendung:** Rufsystem P7

---

hospicall Softwareprodukte zur Installation oder Freischaltung durch Lizenzschlüssel sind Erweiterungen der Rufanlage, deren Funktionalität nicht durch die DIN VDE 0834-1 abgedeckt sind. Gegebenenfalls ist ein Risikomanagement unter Hinzuziehen aller beteiligten Gewerke – insbesondere einer erfahrenen Fachkraft für Rufanlagen – erforderlich. Vor allem bei nicht standardisierten Protokollen sind Machbarkeit und u. U. kostenpflichtige Zusatzaufwendungen im Einzelfall abzusprechen.

Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-VITAL ermöglichen die automatische Rufauslösung bei Inaktivität des Patienten/Bewohners. Dazu wird der Eingang (wahlweise Arbeits- oder Ruhestrom) einer I/O-2-Schnittstelleneinheit mit der Vitalsoftware verknüpft und bei Ausbleiben eines Ereignisses innerhalb eines definierbaren Zeitfenster ein Ruf mit einer definierbaren Priorität erzeugt. Als Trigger kann der potentialfreie Kontakt eines beliebigen Gerätes (z. B. Bewegungsmelder, Türkontakt, Bestätigungstaster o. ä.) verwendet werden. Hinweis: Bei spannungs- bzw. potentialführenden Geräten ist auf die Einhaltung der Isolationswerte (2 x MOPP) nach DIN EN 60601-1 zu achten. Die Freischaltung erfolgt über Lizenzschlüssel auf Systemsteuerzentralen Typ5

## Funktionen

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

### Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung:

Befestigung:

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

### Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x x mm

Gewicht netto: g

Material:

Montage:

Farbe:

### Elektrische Schnittstellen:

-