


## Systemsoftware-Lizenz IF-SW-GMA

Datenblatt-Nr.: 300907 / Stand: 2024/05/13

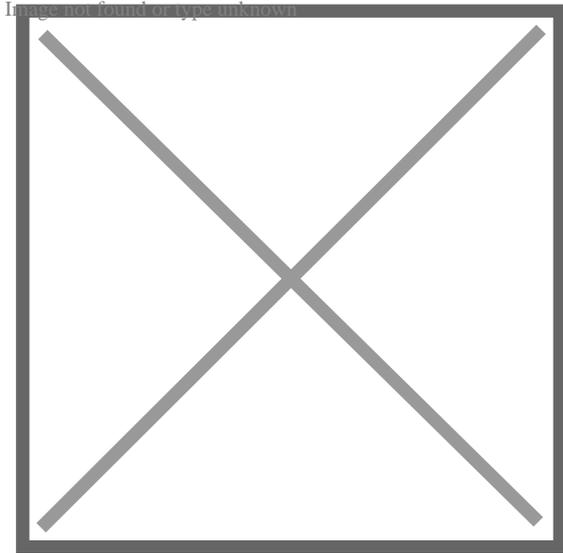

---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Systemsoftware-Lizenz IF-SW-GMA

---

**Artikelnummer:** 300907

---

**Bezeichnung neu:** Systemsoftware IF-SW-GMA

---

**Kurzbeschreibung neu:** IF-SW-GMA

---

**Bezeichnung alt:** Grafische Meldungsanzeige über  
Browser

---

**Kurzbeschreibung alt:** SOFT-STATIONSPLAN

---

**Verwendung:** Rufsystem P7

---

hospicall Softwareprodukte zur Installation oder Freischaltung durch Lizenzschlüssel sind Erweiterungen der Rufanlage, deren Funktionalität nicht durch die DIN VDE 0834-1 abgedeckt sind. Gegebenenfalls ist ein Risikomanagement unter Hinzuziehen aller beteiligten Gewerke – insbesondere einer erfahrenen Fachkraft für Rufanlagen – erforderlich. Vor allem bei nicht standardisierten Protokollen sind Machbarkeit und u. U. kostenpflichtige Zusatzaufwendungen im Einzelfall abzusprechen.

Systemsoftware-Lizenz IF-SW-GMA ermöglicht die Konfiguration Kommunikation zur grafischen Anzeige von Meldungen der Rufanlage (Rufe, Anwesenheiten, Störungen usw.) z. B. in einem Stationsplan. Die Anzeige der zugeordneten Rufe erfolgt dabei browserbasiert über einen oder mehrere Stations-PCs. Diese kann dynamisch in die zugeordnete Ebene wechseln, sodass auch bei großen Objekten eine gut erkennbare Anzeige realisiert werden kann. Bei Systemen mit Sprachkommunikation kann ein zugeordnetes Dienstzimmerterminal (optional mit Tischpult) über die Software gekoppelt werden, sodass die Steuerung der Sprachfunktion/die Rufabfrage benutzerfreundlich über die Bedienoberfläche (mit Maus oder Touchbedienung) erfolgen kann. Das Erscheinungsbild des Stationsplans kann an die jeweiligen Benutzer-/Displayanforderungen angepasst werden (z. B. Schwarzweißdarstellung des Grundrissplans, Skalierung, Auflösung und Formatanpassung der angezeigten Elemente). Dadurch ist die Verwendung sowohl auf einem Standardmonitor im Dienstzimmer als auch an einem Arbeitsplatz zur zentralisierten Rufbearbeitung mit mehreren Monitoren möglich. Die Anzeige ist nicht kompatibel mit dem hospicall Dienstzimmer-Monitor. Die Freischaltung erfolgt über Lizenzschlüssel auf Systemsteuerzentralen Typ5

## Funktionen

- Die ordnungsgemäße Funktion ist abhängig von einer bauseits gestellten(Funk-)Infrastruktur mit einer verlässlichen Verbindung zu den Endgeräten. Sie ist kein Ersatz für die in der DIN 0834-1 geforderten Einrichtung zur Rufauslösung!
- Hinweis: Bei der grafischen Meldungsanzeige handelt es sich um eine Ergänzung des Rufsystems. Die Verwendung eines Zimmermoduls zur Ruf-/ Anwesenheitssteuerung sowie für die Notfunktion bzw. eines geeigneten Zimmerterminals bei der Nutzung der Sprachkommunikation ist obligatorisch
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

### Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung:

Befestigung:

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

### Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x x mm

Gewicht netto: g

Material:

Montage:

Farbe:

### Elektrische Schnittstellen:

-