

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Schallwächter zur akustischen Rufauslösung UP
ARTIKEL:	310459
TYPE:	SW-UP
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Schallwächter zur akustischen Rufauslösung dient zur Auslösung eines Rufes in der Rufanlage durch ein Geräusch. Sobald der Geräuschpegel in einem Raum für eine bestimmte, vorgewählte Zeitdauer einen zuvor eingestellten Grenzwert überschreitet wird ein Ruf ausgelöst. Für die Funktion im Lichtrufsystem und die Aktivierung/Deaktivierung der Akustik-Rufeinheit ist der Einsatz eines I/O-Modules erforderlich. Einsatzmöglichkeiten für die Akustik-Rufeinheit sind Baby- oder Dementen-Stationen sowie alle anderen Anwendungsbereiche, in denen hilfebedürftige Menschen nur durch stimmliche Laute auf sich aufmerksam machen können.

Montage/Anschluss

Die Akustik-Rufeinheit kann z.B. in der Nähe des Bettes an der Wand, in der Decke oder auch innen neben der Eingangstür installiert werden. Der Anschluss erfolgt direkt an einem Elektronik-Modul.

Ruf-Unterscheidung:

Der durch die Akustik-Rufeinheit ausgelöste Ruf wird wie ein normaler Ruf an der Ruf-Abstelleinheit abgestellt. Dabei geht die gelbe LED in der Akustik-Rufeinheit automatisch mit aus. Falls der Patient den Ruf durch einen normalen Birntaster ausgelöst hat, geht die gelbe LED nicht mit an. Dadurch kann die Herkunft des Rufes unterschieden werden, auch wenn sich die akustische Rufeinheit im gleichen Raum befindet.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	24VDC (aus Rufanlage)
Einstellbereich Verzögerung:	ca. 0..3s (einstellbar am Einstellregler)
Einstellbereich	
Grund-Verstärkung:	9..300-fach (einstellbar am Einstellregler)
Einstellbereich	
Ansprech-Schwelle:	0.. max (einstellbar am Einstellregler S)
Rufwiederholung:	bei Dauergeräusch (oberhalb der Schwelle): automatische Ruf-Wiederholung alle 30s

Mechanische Eigenschaften:

Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9010
Montageort:	UP-Dose, tief
Lieferumfang:	Lieferung inklusive Blende und Rahmen