

Bedienungs- und Anschlussanleitung Dienstzimmermonitor P7

Das hospicall Dienstzimmermonitor P7 ist ein 16:9 Touch-PC zur intuitiven Bedienung. Dadurch wird eine unkomplizierte und schnelle Bearbeitung von Rufen und weiteren Funktionen ermöglicht.

Weiterhin wird die Nutzung hilfreicher Zusatzfunktionen erleichtert und unterstützt, das bedeutet eine spürbare Entlastung des Personals. Die zeitgemäße Menü-/Systemführung ist sicher und gewährleistet rationelle Abläufe im Pflegealltag.

Der Anschluss erfolgt über eine separate Busanschlussdose an den Systembus Ethernet (LAN).

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Elektronischen Geräten	2
Bedienelemente Front.....	3
Anschlüsse Rückseite.....	4
Inbetriebnahme des Dienstzimmermonitor P7	5

hospicall GmbH
Martin-Siebert-Straße 1
51647 Gummersbach
T +49 2261 9583-100
www.hospicall.com



Version	Datum	Seite	241503C
1.1	13.10.2020	1 von 7	

Die hospicall GmbH behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Produktinformation ohne Vorankündigung zu ändern.

Bedienungs- und Anschlussanleitung Dienstzimmermonitor P7

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Elektronischen Geräten



Sehr geehrter Kunde,
bitte beachten Sie unbedingt nachstehende Sicherheitshinweise zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandrisiken:


- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung elektrischer Geräte, Anlagen oder Leitungen von ihrem einwandfreien Zustand.
- Melden Sie Schäden oder ungewöhnliche Erscheinungen an elektrischen Geräten, Anlagen oder Leitungen sofort dem Vorgesetzten/der Vorgesetzten oder einer Elektrofachkraft. Gerät, Anlage oder Leitung nicht weiter verwenden und verhindern, dass andere Personen sie benutzen können; auf Gefahren hinweisen.
- An Elektroleitungen keine Gegenstände wie z.B. Dekorationen, S-Haken oder Kleiderbügel aufhängen.
- Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen, sondern mit einer Hand die Steckdose halten und mit der anderen den Stecker fassen und herausziehen.
- Elektroleitungen nicht über Verkehrswege legen. Lässt sich das nicht vermeiden, Kabelbrücken aus Kunststoff verwenden oder die Leitung von oben zuführen.
- Verlängerungsleitungen und Mehrfachsteckdosen mit beweglicher Anschlussleitung nicht überlasten. Aus diesem Grund an Mehrfachsteckdosen keine weiteren Mehrfachsteckdosen anschließen.
- Leitungen in Möbeln oder zu elektrischen Arbeitsmitteln so verlegen, dass sie nicht gequetscht und nicht durch scharfe Kanten, Ecken oder bewegliche Teile beschädigt werden können.
- Bedienen Sie an elektrischen Geräten oder Anlagen nur die dafür bestimmten Schalter und Stelleinrichtungen. Keine Einstellungen an Sicherheitseinrichtungen verändern.
- Grundsätzlich bei Nässe und Feuchtigkeit keine elektrischen Geräte benutzen und keine elektrischen Anlagen bedienen, auch nicht, wenn nur Ihre Hände oder Füße nass sind.
- Bei Störungen sofort Spannung abschalten, Stecker ziehen.
- Keine Reparaturen und "Bastelarbeiten" - auch noch so einfacher Art - an elektrischen Geräten, Anlagen und Leitungen durchführen. Reparaturen nur von Fachleuten ausführen lassen.

Version	Datum	Seite	241503C
1.1	13.10.2020	2 von 7	

Bedienungs- und Anschlussanleitung Dienstzimmermonitor P7

Bedienelemente Front

Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung der Frontseitigen Bedienelemente des Monitors:

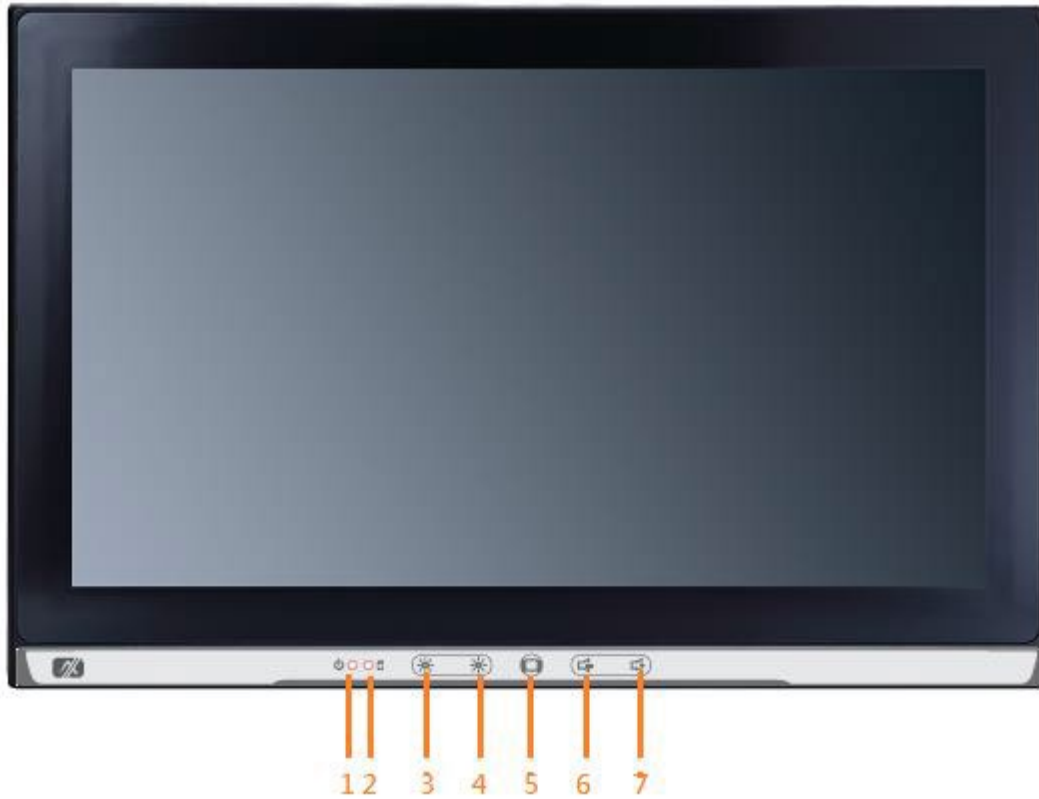


1. Einschaltanzeige LED
Orange: Anzeige aus
Grün: Anzeige ein
2. Speicherzugriff LED
3. Helligkeit –
4. Helligkeit +
5. Anzeige ein / aus
6. Lautstärke – bitte nicht benutzen - Funktion wird nicht unterstützt
7. Lautstärke + bitte nicht benutzen - Funktion wird nicht unterstützt

Bedienungs- und Anschlussanleitung Dienstzimmermonitor P7

Anschlüsse Rückseite

Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung der rückseitigen Anschlussmöglichkeiten des Monitors:

Externer Netzteilanschluss 12V/5A
fixierbarer Hohlstecker

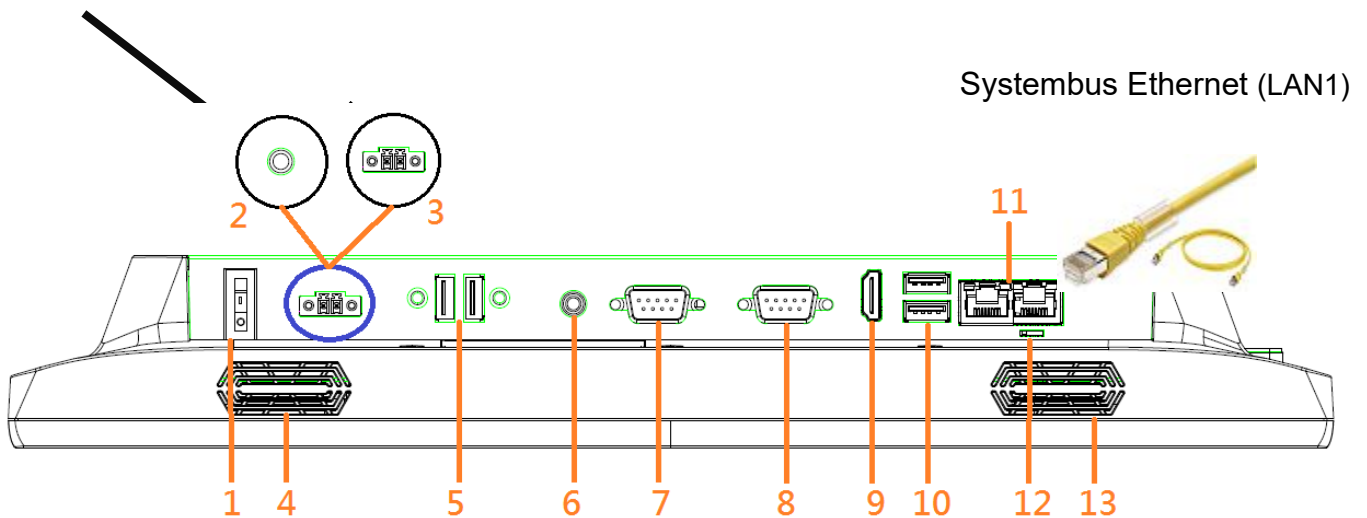

1. Geräte – Hauptschalter – nur Tasterfunktion
2. Hohlsteckerbuchse (fixierbar) für 12V Versorgungsspannung vom externen Schaltnetzteil
3. N/A
4. Lautsprecher rechts
5. – 10. Diese Schnittstellen werden in der Anwendung nicht gebraucht
6. Keine Verwendung
7. Keine Verwendung
8. Keine Verwendung
9. Keine Verwendung
10. Keine Verwendung
11. LAN - Schnittstelle – Bitte die äußere RJ45 Buchse zum Anschluss an den Systembus verwenden. (Aus obiger Ansicht ist die rechte Buchse zu verwenden).
12. Schalterstellung AT. **NICHT VERÄNDERN!!!**
13. Lautsprecher links

Bedienungs- und Anschlussanleitung Dienstzimmermonitor P7

Inbetriebnahme des Dienstzimmermonitor P7

1. Monitor vorsichtig auspacken.
2. Montage am Standfuß bzw. an der Wandhalterung vornehmen (Standard VESA100x100 - Halterung).
3. Gerät an einem sicheren Standort aufstellen.
4. Netzkabel der Kategorie Cat5e oder höher an die äußere LAN Buchse (11) anschließen.
Zur galvanischen Trennung der Systeme nach DIN VDE 0834 ist ein Galvanischer-Ethernet-Trenner Best. Nr. 300022 (separat) einzusetzen.
5. Hohlstecker des externen Netzteils an Buchse (2) auf der Geräteunterseite kontaktieren und fixieren (verschrauben).
Hinweis: Die AT- Funktionalität sorgt dafür, dass sich das Gerät automatisch einschaltet sobald die Spannungsversorgung hergestellt wird. D.h. es müssen keine Schalter oder andere Bedienelemente betätigt werden.
6. Nach erfolgter - automatischer Anmeldung im Netzwerk ist das Gerät nun betriebsbereit.
7. Anmeldung im Netzwerk.

Anmeldung Benutzer ohne Passwort

P7 Terminal

login

Benutzer:


Benutzer 1

Login


hospicall
Ruflsysteme

Bedienungs- und Anschlussanleitung Dienstzimmermonitor P7

Anmeldung Benutzer mit Passwort

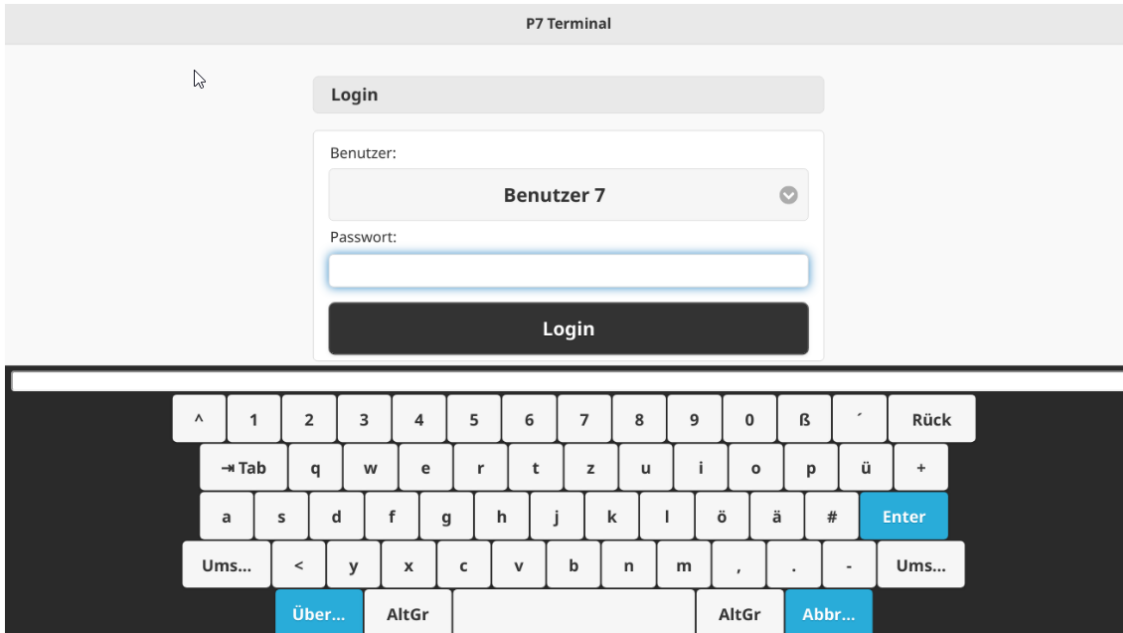

Übersicht Startfenster nach Login.

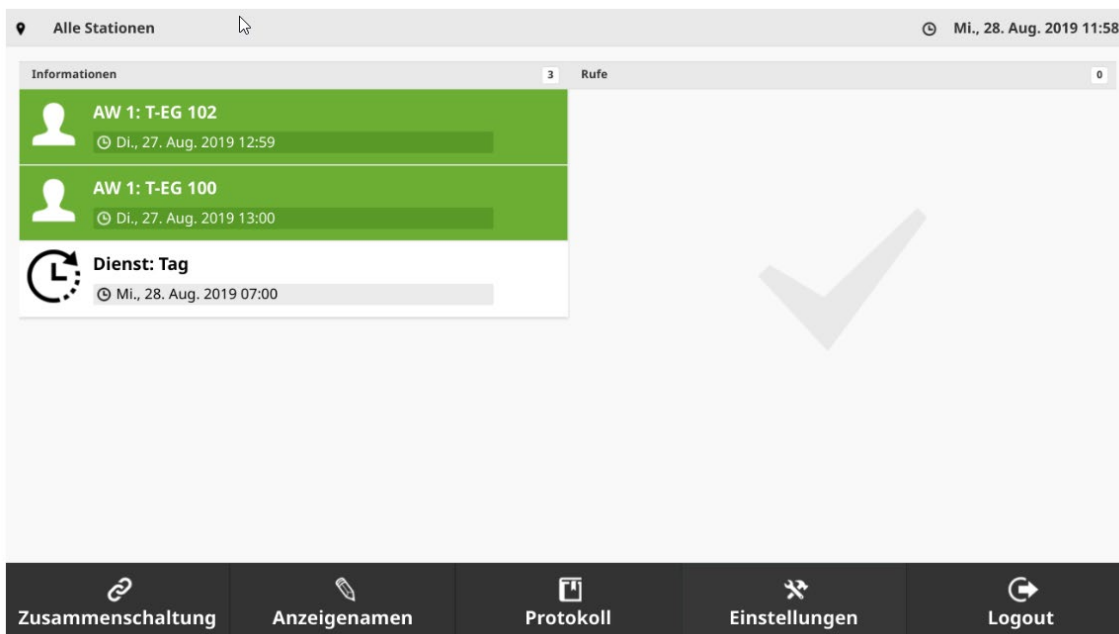

Nach dem Klick auf Einstellungen erscheint folgendes Fenster.

Version	Datum	Seite	241503C
1.1	13.10.2020	6 von 7	

Bedienungs- und Anschlussanleitung Dienstzimmermonitor P7

Zuweisung zu einem Dienstzimmer

Modus: production [9]


Einstellungen

Rufe sortieren nach

Akustische Rückmeldung

Erweiterte Einstellungen

Verbunden mit

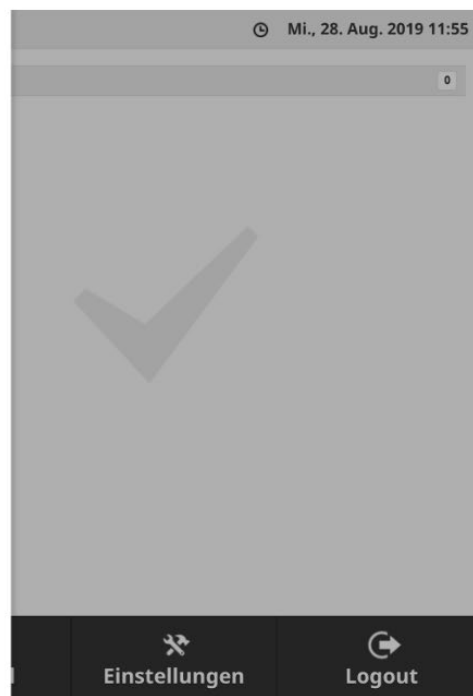

hospicall GmbH
Martin-Siebert-Straße 1
51647 Gummersbach
T +49 2261 9583-100
www.hospicall.com



Version	Datum	Seite	241503C
1.1	13.10.2020	7 von 7	

Die hospicall GmbH behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Produktinformation ohne Vorankündigung zu ändern.