


Basisstation für das Funkrufsystem FU7 mit Batterieüberwachung 344006

Programmieranleitung

1. Allgemeines

- Die Konfiguration des FU7-Systems geschieht mittels Browser. Ein PC wird über Standard-Patchkabel mit der LAN-Schnittstelle der FU7-Basisstation verbunden.
- Die Anzeige und Abstellung von Rufen des FU7-Systems kann zum einen über eine Online-Anzeige im Browser oder durch Anschluss eines Zimmerterminals (ZT7) an die Stationsbusschnittstelle realisiert werden. Rufe können auch mit Funkabsteltastern abgestellt werden.
- Die FU7-Basisstation ist mit einem Anschlusskabel für eine 230VSteckdose versehen.

Bild: FU7-BAS-BATTERIE 2.0

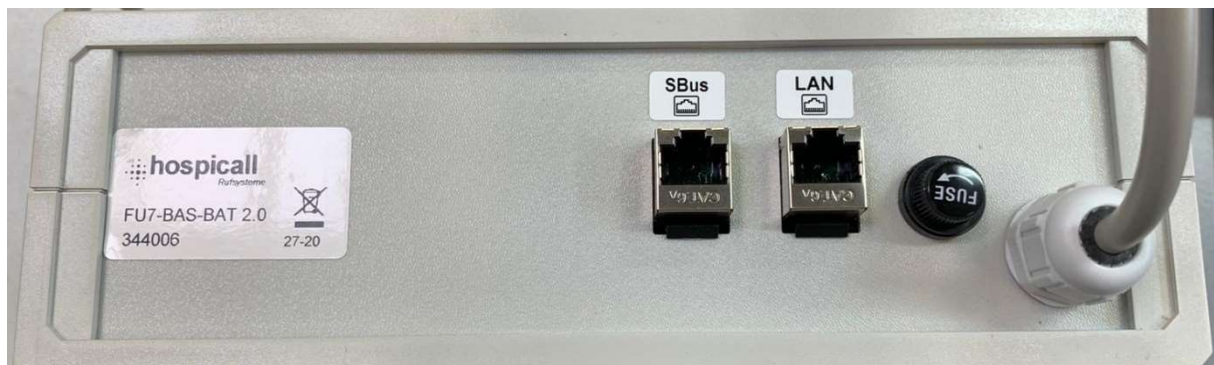


- Zur Erhöhung der Reichweite des Funksignals können Repeater inForm von Steckdosen- und Unterputz Repeatern eingesetzt werden.


Hinweis: Diese Repeater erhalten keine Konfiguration und werden im System nicht angezeigt.

2. Konfiguration

- Die LAN-Schnittstelle der FU7-Basisstation hat im Auslieferungszustand die IP-Adresse 192.168.0.220.
- Durch Eingabe dieser IP in der Adressleiste des Browsers erhält man ein Auswahlfenster für zum einen die Terminal-Anwendung mit Online-Meldungsanzeige und zum anderen für die Konfiguration.

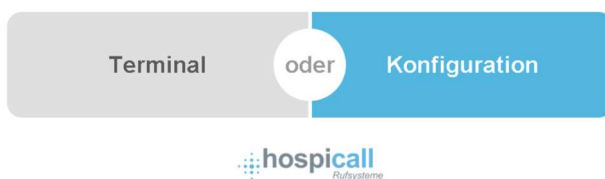

- Nach Auswahl der Konfiguration werden Sie aufgefordert sich anzumelden.
- Die Benutzerkennung ist hier „fu7config“ als Name und auch als Passwort.

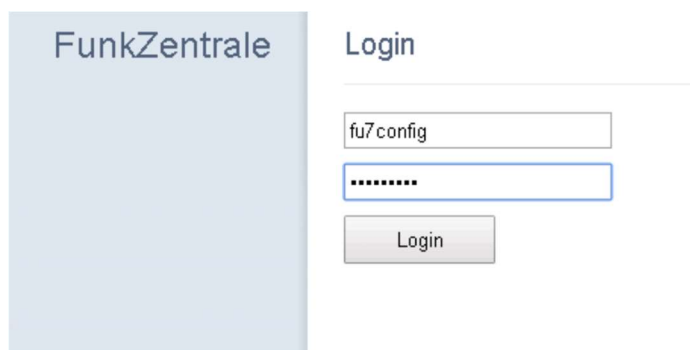

- Man erhält folgendes Menü




3. FU7-Sender (Tags) anlernen



- Nach der Auswahl **Externe Systeme / Funkruf** wählt man im rechten Fenster den Punkt **Tags konfigurieren**.



- Jetzt wird der Anlernmodus freigegeben und gespeichert.

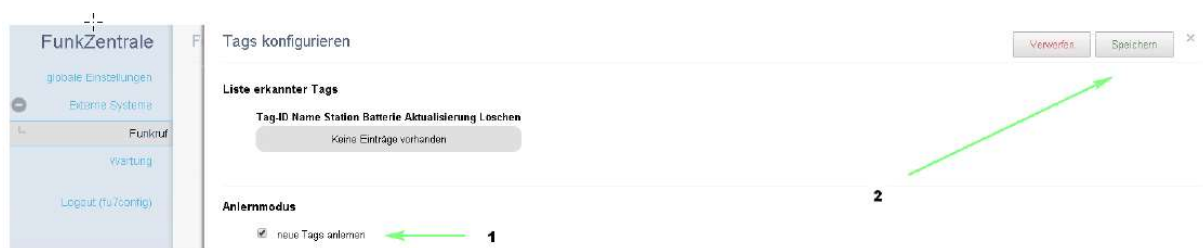

- Nach Auslösen eines Tags erscheint dieser nach Neuaufruf der Seite in der Liste erkannte Tags.



- Mit Auswahl des Namenfeldes kann dieser in z.B. **Zimmer 1** als Anzeige bei Rufauslösung geändert werden.



FunkZentrale | 1008462865 konfigurieren

Parameter des Tags

Tag-Identifikation: 1008462865

Name:

Typ:

Station:

Abstellung:

- Auf die gleiche Weise werden Abstelltaster angelernt. Hier wird als Typ **Abstelltaster** ausgewählt.



FunkZentrale | 3410893304 konfigurieren

Parameter des Tags

Tag-Identifikation: 3410893304

Name:

Typ:

Station:

- Ein Abstelltaster wird einem oder mehreren Ruftastern als Abstellung zugeordnet.



FunkZentrale | Zimmer 1 (1008462865) konfigurieren

Parameter des Tags

Tag-Identifikation: 1008462865

Name:

Typ:

Station:

Abstellung:

- Sind alle Tags angelemt, sollte man den Anlernmodus wieder deaktivieren um Fehlerufe von Geräten die auf der gleichen Frequenz senden, zu vermeiden.



Tags konfigurieren


Liste erkannter Tags

Tag-ID	Name	Station	Batterie	Aktualisierung	Löschen
982989	Zimmer 1	Station Funk	ok	15.12.2015	
928596	Zimmer 2	Station Funk	ok	15.12.2015	

Anlernmodus

neue Tags anlernen 

- Die Einstellungen unter **Externe Systeme / Funkruf / Allgemeine Einstellungen** sollten nicht verändert werden.

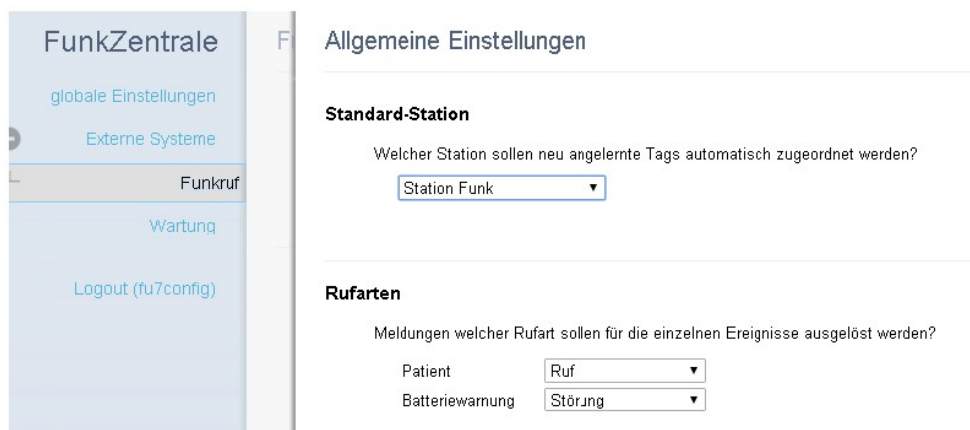

Allgemeine Einstellungen

Standard-Station

Welcher Station sollen neu angeleimte Tags automatisch zugeordnet werden?

Rufarten

Meldungen welcher Rufart sollen für die einzelnen Ereignisse ausgelöst werden?

Patient

Batteriewarnung

4. Weitere Funktionen

- Über das Menü **globale Einstellungen / Netzwerkeinstellungen** kann die IP-Adresse der FU7-Basisstation an die Gegebenheiten im Haus angepasst werden.



The screenshot shows the 'FunkZentrale' web interface. On the left is a navigation menu with 'globale Einstellungen' selected. The main content area is titled 'globale Einstellungen' and contains two sections: 'Spracheinstellungen' and 'Netzwerkeinstellungen der Systemsteuerzentrale'. The 'Netzwerkeinstellungen' section has four input fields: 'Externe IP-Adresse' (192.168.0.220), 'Netzmaske' (255.255.255.0), 'Standardgateway' (192.168.0.254), and 'DNS-Nameserver' (empty). A green arrow points to the 'Externe IP-Adresse' field.

- Über das Menü **Wartung / Datensicherung erstellen** können die eingegebenen Daten direkt auf den angeschlossenen PC gesichert werden und im Bedarfsfall wieder eingespielt werden.



The screenshot shows the 'FunkZentrale' web interface with the 'Wartung' menu item selected in the left navigation bar. The main content area is titled 'Datensichern und Wiederherstellen' and contains a section 'Datensicherung' with a single button labeled 'Datensicherung erstellen'.

5. Bearbeitung von Funkmeldungen

- Für die Signalisierung und Abstellung von Funkmeldungen kann an die FU7-Basisstation über den Stationsbus ein ZT7 angeschlossen werden. (Zur Wandmontage oder wie im Bild mit Tischpult)



- Durch Druck auf das Display gilt die Meldung als erkannt und wird Quittiert


- Alternativ können Funkmeldungen auch über unsere Terminal-Anwendung im Browser bzw. über den DZT7-Monitor bearbeitet werden.




- Durch Mausklick auf die Anzeige im Browser ist die Meldung quittiert.

6. Protokollierung

- Alle Funkmeldungen und Abstellung von diesen werden im hospicall Rufsystem protokolliert und gespeichert und können über die Terminal-Anwendung im Browser ausgewertet werden.

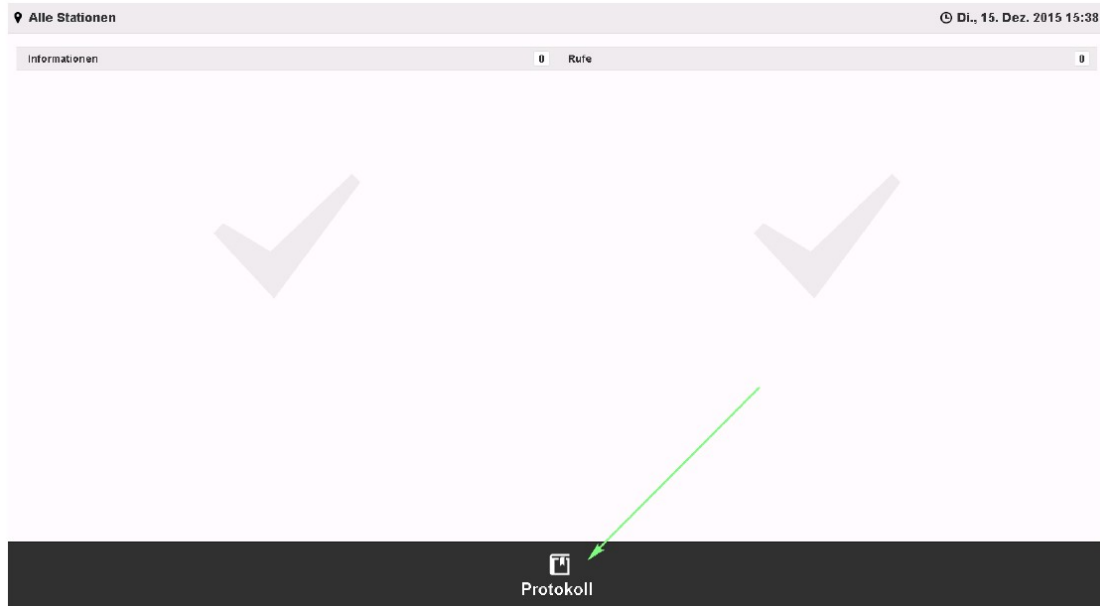

- Auswertung der Meldungshistorie:

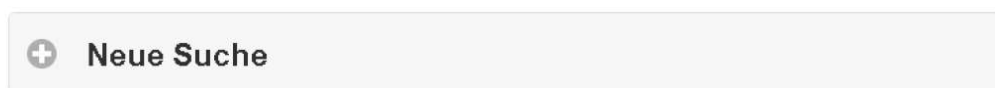

Status	Zeitpunkt	Rufart	Info	Station
Dienstag, 15.12.2015				
✘	15:34:51 🕒 04m:12s	Ruf	Zimmer 2	Station Funk
✘	15:34:43 🕒 04m:17s	Ruf	Zimmer 1	Station Funk

- Durch die Auswahl **Neue Suche** und einen Mausklick auf den Download-Button erhält man die Meldungshistorie direkt für den ausgewählten Zeitraum als Datei im PDF-Format auf den angeschlossenen PC.

Neue Suche

Suchtext

Zeitraum	Rufartgruppe	Station
von: 15.12.2015	bis: 15.12.2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Dauer ermitteln		

