

Rufsystem hospicall P3



Rufsysteme für Pflegeeinrichtungen
Wirtschaftliche Projektlösungen
Einfache, verständliche Bedienung
Kostengünstige Montage und Wartung
Entsprechend der Norm DIN VDE 0834

Bedienungsanleitung

Sie haben sich mit dem hospicall P3 Rufsystem für ein hochwertiges, wirtschaftliches und zukunftssicheres Produkt entschieden.

Das hospicall-Team hat dieses Handbuch mit größter Sorgfalt hergestellt, dennoch können sich Fehler oder Ungenauigkeiten einschleichen.

Die in diesem Handbuch vorkommenden Technischen Daten und Spezifikationen wurden nur zu Informationszwecken erstellt, können ohne Ankündigung geändert werden und dürfen nicht als Verbindlichkeit von hospicall interpretiert werden. Hospicall übernimmt keine Verantwortung oder Verbindlichkeit für Fehler oder Ungenauigkeiten dieses Handbuches, einschließlich der darin beschriebenen Produkte.

Bedienungsanleitung

Allgemeines

Die Pflegekraft betätigt, wenn sie einen Raum betritt, die Anwesenheitstaste (grün) oder hält einen Pflgegetransponder *1 vor das Transponder-Symbol. Hierdurch wird die Anwesenheit im Zimmer markiert (grüne Lampe), gleichzeitig werden alle Rufe (außer Bad/WC-Rufe und Steckerabwurfrufe), die im Zimmer anstehen quitiert und damit gelöscht.

Rufe aus anderen Räumen werden akustisch in einen Raum mit markierter Anwesenheit nachgesendet. Beim Verlassen des Raumes wird durch nochmaliges Drücken der Anwesenheitstaste oder Vorhalten des Pflgegetransponders *1 die Anwesenheit im Zimmer zurückgesetzt.

Rufarten

Die Rufe werden optisch und akustisch unterschiedlich signalisiert.
Die Rufe werden in 3 Prioritätsklassen eingeteilt.

- 1 Anwesenheiten, Systemmeldungen
- 2 Normalrufe, Bad/WC-Rufe, Telefonrufe, Steckerabwurfrufe
- 3 Notrufe, Bad/WC-Notrufe

Ein **Normalruf** wird durch Betätigung der roten Ruftaste an der Tür oder am Bett ausgelöst.

optisch: rotes Dauerlicht an der Rufeinheit und an der Zimmerlampe
akustisch: kurzes Summersignal alle 10 Sekunden; nur in Räumen mit markierter Anwesenheit

Ein **Bad/WC-Ruf** wird durch Betätigung des Zugtasters oder der roten Ruftaste in der Naßzelle ausgelöst.

optisch: rotes Dauerlicht an der Rufeinheit, rotes und weißes Dauerlicht an der Zimmerlampe
akustisch: kurzes Summersignal alle 10 Sekunden; nur in Räumen mit markierter Anwesenheit

Ein **Telefonruf** wird über einen, an die Gruppenzentrale angeschlossenen, analogen Telefonanschluß ausgelöst.

akustisch: Summersignal 2 Töne, Pause (ähnlich Telefonklingeln); nur in Räumen mit markierter Anwesenheit

Ein **Notruf** wird, bei **markierter Anwesenheit**, durch Betätigung der roten Ruftaste an der Tür oder am Bett ausgelöst.

optisch: rotes Flackerlicht an der Rufeinheit und an der Zimmerlampe
akustisch: intermittierendes Summersignal 1,2 Sekunden Intervall; nur in Räumen mit markierter Anwesenheit

Ein **Bad/WC-Notruf** wird, bei **markierter Anwesenheit**, durch Betätigung des Zugtasters, des Pneumatiktasters oder der roten Ruftaste in der Naßzelle ausgelöst.

optisch: rotes Flackerlicht an der Rufeinheit, rotes und weißes Flackerlicht an der Zimmerlampe
akustisch: intermittierendes Summersignal 1,2 Sekunden Intervall; nur in Räumen mit markierter Anwesenheit

Ein **Steckerabwurfruf** wird durch Entfernen des Birn- oder Mehrfachtasters, oder des Schutzadapters aus der Buchse des Ruftasters mit Nebensteckkontakt ausgelöst. Dieses erfolgt nach ca. 6 Sekunden.

optisch: rotes Dauerlicht an der Rufeinheit und an der Zimmerlampe
akustisch: kurzes Summersignal alle 10 Sekunden; nur in Räumen mit markierter Anwesenheit

Bedienungsanleitung

Rufabstellung

Die **Rufe** werden durch einen Anwesenheitswechsel (grüne Taste an der Tür) oder Vorhalten des Pflege-Transponders *1 abgestellt. Ausgenommen sind hiervon Bad/WC-Rufe, Bad/WC-Notrufe und Steckerabwurfrufe.

Bad/WC-Rufe und **Bad/WC-Notrufe** werden über eine separate Abstell Taste (grüne Taste in der Naßzelle) abgestellt.

Ein **Steckerabwurfruf** wird durch dauerhafte Betätigung der grünen Anwesenheitstaste abgestellt. Nach ca. 3 Sekunden erfolgt als Bestätigung ein kurzer Piepton.

Farben der Taster/Signalleuchten

Folgende Farben werden für die unterschiedlichen Funktionen verwendet:

Taster:

rote Taster: Ruf, Notruf, Bad/WC-Ruf, Bad/WC-Notruf

grüne Taster: Anwesenheit, Abstell Taster



hier kann mit dem Transponder die Anwesenheit gesetzt oder gelöscht werden *1

Signalleuchten:

Notruf **rot** (Flackerlicht)

Bad/WC-Notruf **rot/weiß** (Flackerlicht)

Ruf **rot**

Steckerabwurf **rot**

Anwesenheit **grün**

Bedienungsanleitung

Zimmerterminal ZT3iS


Nachdem die Pflegekraft beim Betreten des Zimmers durch Betätigung der grünen Taste am ZT3iS die Anwesenheit markiert hat, wird das Display im ZT3iS aktiviert. In anderen Zimmern anstehende Rufe werden, sortiert nach Prioritäten, angezeigt. Das bedeutet, solange Notrufe aktiv sind, werden keine Normalrufe angezeigt.

Eine akustische Rufnachsendung erfolgt über den integrierten Summer. Stehen weder Not- noch Normalrufe an, werden Anwesenheiten bzw. Systemmeldungen angezeigt.

Wird bei markierter Anwesenheit die rote Ruftaste des ZT3iS betätigt, wird ein Notruf ausgelöst.

Die Betätigung der grünen Anwesenheitstaste stellt alle Rufe im Zimmer ab. Bad/WC-Rufe bzw. Bad/WC-Notrufe werden nicht abgestellt, hierzu muß die grüne Abstelltaste in der Naßzelle betätigt werden.

Beim Verlassen des Zimmers betätigt die Pflegekraft die grüne Anwesenheitstaste, die grüne Zimmerlampe erlischt, das Display wird deaktiviert und die Anwesenheitsmeldung aufgehoben.

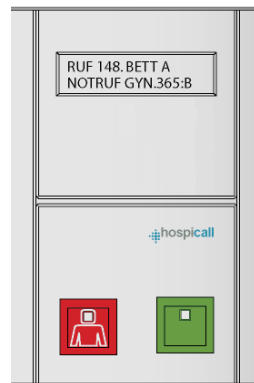


Dienstzimmerterminal ZT3iS

Im Dienstzimmer werden, bei markierter Anwesenheit, alle Rufe aus der eigenen bzw. mit der eigenen Station zusammengeschaltete Stationen optisch und akustisch, sortiert nach Prioritäten angezeigt. Das bedeutet, solange Notrufe aktiv sind, werden keine Normalrufe angezeigt.

Eine akustische Rufnachsendung erfolgt über den integrierten Summer. Stehen weder Not- noch Normalrufe an, werden Anwesenheiten bzw. Systemmeldungen angezeigt.

Über die Tastfläche Δ , ∇ und \leftarrow können vorprogrammierte Gruppenzusammenschaltungen aufgerufen, bzw. aufgelöst werden.

Hierzu wird die Tastfläche \leftarrow berührt (Anzeige: „Dienst-auswahl“). Nach nochmaliger Berührung der Tastfläche \leftarrow (Anzeige: „Freigegebene Zusammenschaltungen“) kann mittels der Tastflächen Δ oder ∇ durch die verschiedenen Zusammenschaltungsmöglichkeiten geblättert werden (Anzeige: Zeile 1: die Zusammenschaltung, Zeile 2: der Status aktiv, oder nicht aktiv). Durch berühren der Tastfläche \leftarrow kann der Status geändert werden. Wird für ca. 40 Sekunden keine Tastfläche berührt, kehrt das Display zur Standardanzeige (Ruf- und Anwesenheitsanzeige) zurück.

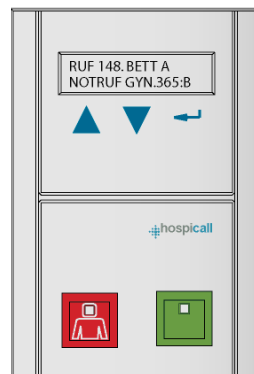


Bedienungsanleitung


Zimmerausstattung

Rufeinheiten an der Tür


Zimmermodul 2

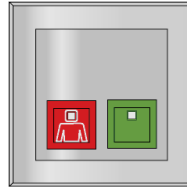

Zimmerterminal ZT3iS

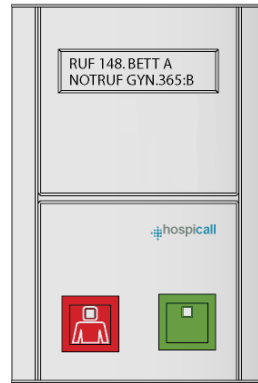


Ruf- und Abstelltaster

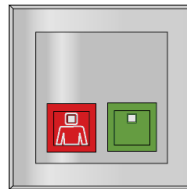


Rufeinheiten am Bett

Ruftaster

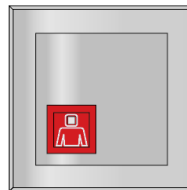


Ruftaster mit Nebensteckkontakt
(für Birn- und Mehrfachtaster)

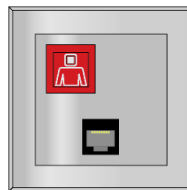


Bedienungsanleitung

Rufeinheiten in der Naßzelle


Zugtaster

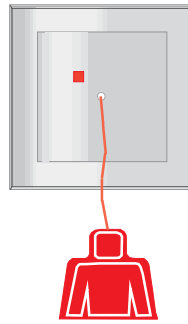


Pneumatischer Ruftaster

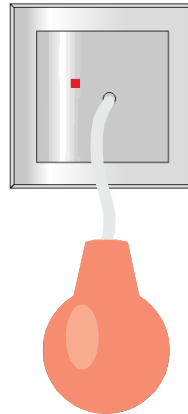


Ruftaster

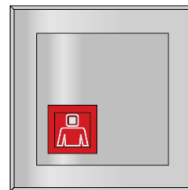

Ruf- und Abstelltaster

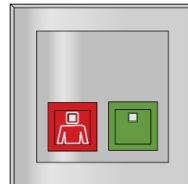

Für Ihre Notizen:

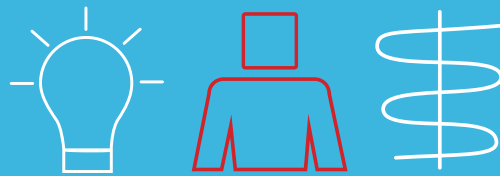

... damit auf Knopfdruck **Hilfe** kommt!