

Funkempfänger Set 31 04 55 Ruhestrom

Das Funkempfänger Set 31 04 55 besteht aus folgenden Komponenten:

- Funksteuerung 31 04 51
- Funk Armbandsender 31 04 53

Das Funkempfänger Set arbeitet mit einer 48-Bit Codierung. Werksseitig ist einer von über 70 Millionen verschiedenen Codes eingestellt. Die Geräte sind im Set aufeinander abgestimmt. Es ist keine weitere Einstellung notwendig.

Die Reichweite beträgt ca. 30 m.

Die Funksteuerung ist für den Anschluss an den 8-poligen Nebensteckkontakt der hospicall Rufsysteme konzipiert. Beachten Sie bitte, dass die Verkabelung der Rufanlage entsprechend vorbereitet sein muss. Sollen mehrere Empfänger in einem Bereich betrieben werden, halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3 m ein. Betreiben Sie den Empfänger niemals in einem geschlossenen Metallbehältnis oder auf einer metallenen Oberfläche. Testen Sie nach Anschluss ausführlich die Empfangsqualität.



Funk Sender als
Armbandsender

Funk Armbandsender

Der Funk Armbandsender ist mit einem Armband mit nickelfreiem Verschluss versehen.

Bedienung:

Die Bedientastegedrückt halten, die Leuchtdiode leuchtet. Wenn die Leuchtdiode blinkt, muss die Batterie gewechselt werden

Fehlerbehebung:

Leuchtet die LED am Sender, der Empfänger zeigt aber keine Reaktion:
Abstand zum Empfänger verringern oder
Codierung des Senders neu auf den Empfänger übertragen (siehe unten).

Funk Empfänger


Der Funk Empfänger ist betriebsbereit vorbereitet. Er wird in die 7-polige Buchse des Nebensteckkontaktes eingesteckt.

Empfängt der Funk Empfänger ein entsprechend codiertes Signal von einem ihm zugeordneten Funk Sender, betätigt er für ca. 1 Sekunde den Kontakt, der damit das Signal zur Rufanlage weitergibt.

Sendercode speichern

Wird ein neuer Funk Sender einem Empfänger zugeordnet, so muss der Funk Empfänger den neuen Code lernen:

- Den Deckel des Gehäuses entfernen.
- Taste TA1 für ca. 3 Sek. betätigen.
- Die LED blinkt für ca. 10 Sek.
- Innerhalb der 10 Sek. die

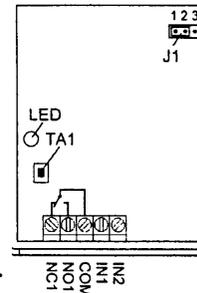

Sendertaste betätigen.

Hat die Funksteuerung den Sendercode gespeichert, blinkt die LED für ca. 2 Sekunden schnell. Es können max. 4 Sender gespeichert werden.

- Abschließend wird der Deckel wieder aufgesetzt und mit den 4 Schrauben geschlossen.

Technische Daten:

Funk Empfänger:

Spannungsversorgung: 12-24V DC
Stromaufnahme: ca. 35 mA
Ausgangsbelastung: 60V DC/1A/30W
Temperaturbereich: -20°C...+60°C

Funk Armbandsender:

Spannungsversorgung: 1 x 3 V Lithium Batterien (CR 2032)

Abmessungen: 35 x 40 x 16mm
Temperaturbereich: -20°C...+60°C
Frequenz: 433,92 MHz



hospicall GmbH
Martin-Siebert-Straße 1
51647 Gummersbach
T +49 2261 9583-100
www.hospicall.com

