


Funkruf FU7

Programmieranleitung

1. Allgemeines

- Die Konfiguration des FU7-Systems geschieht mittels Browser. Ein PC wird über Standard-Patchkabel mit der LAN-Schnittstelle der FU7-Zentrale verbunden.
- Die Anzeige und Abstellung von Rufen des FU7-Systems kann zum einen über eine Online-Anzeige im Browser oder durch Anschluss eines Zimmerterminals (ZT7) an die Stationsbusschnittstelle realisiert werden.
- Die FU7-Zentrale ist mit einem Anschlusskabel für eine 230V-Steckdose versehen.

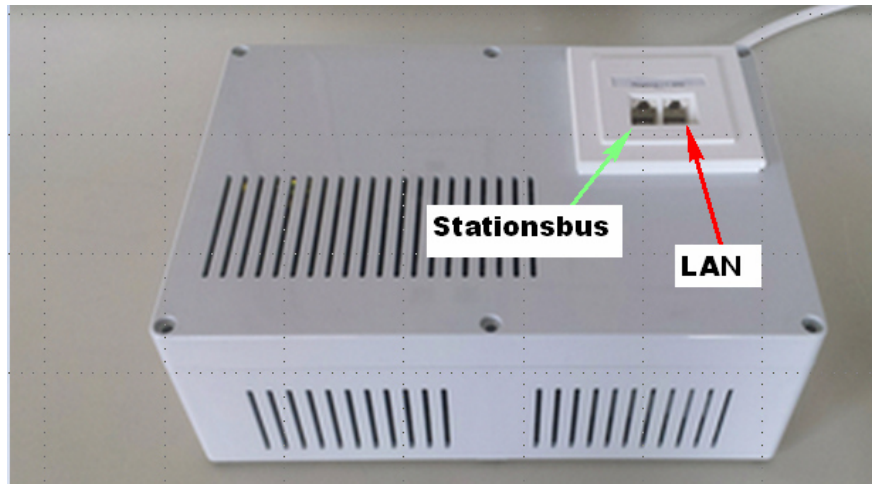


2. Konfiguration

- Die LAN-Schnittstelle der FU7-Zentrale hat im Auslieferungszustand die IP-Adresse 192.168.0.254.
- Durch Eingabe dieser IP in der Adressleiste des Browser erhält man ein Auswahlfenster für zum einen die Terminal-Anwendung mit Online-Meldungsanzeige und zum anderen für die Konfiguration.



- Nach Auswahl der Konfiguration werden Sie aufgefordert sich anzumelden.
- Die Benutzerkennung ist hier „fu7config“ als Name und auch als Passwort.

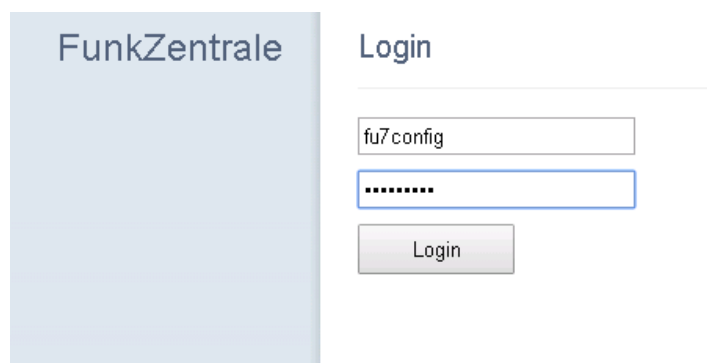

- Man erhält folgendes Menü




3. FU7-Sender (Tags) anlernen




- Nach der Auswahl **Externe Systeme / Funkruf** wählt man im rechten Fenster den Punkt **Tags konfigurieren**.



- Jetzt wird der Anlernmodus freigegeben und gespeichert.

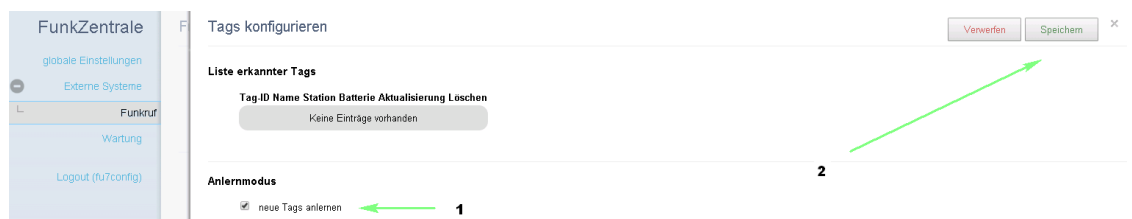

- Nach Auslösen eines Tags erscheint dieser nach Neuaufwurf der Seite in der Liste erkannter Tags.

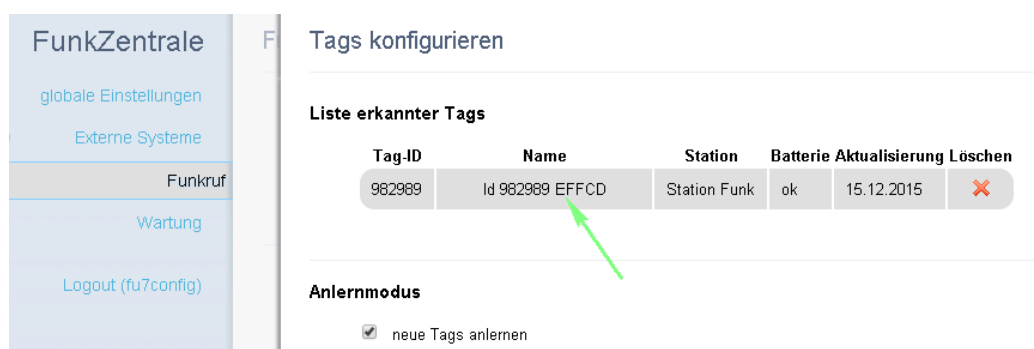

- Mit Auswahl des Namenfeldes kann dieser in z.B. **Zimmer 1** als Anzeige bei Rufauslösung geändert werden.



FunkZentrale

- globale Einstellungen
- Externe Systeme
- Funkruf**
- Wartung

Id 982989 EFFCD (982989) konfigurieren


Parameter des Tags

Tag-Identifikation: 982989

Name:

Station:

- Sind alle Tags angelernt, sollte man den Anlernmodus wieder deaktivieren um Fehlrufe von Geräten die auf der gleichen Frequenz senden, zu vermeiden.

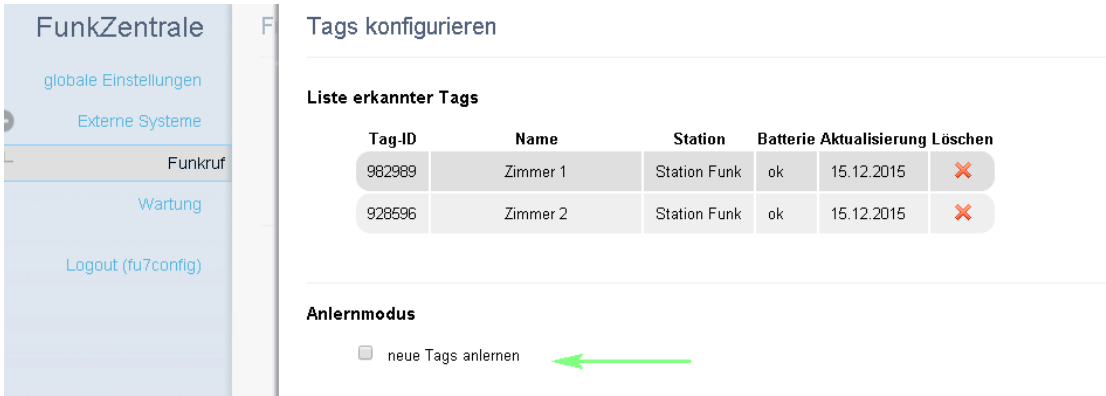

FunkZentrale


- globale Einstellungen
- Externe Systeme
- Funkruf**
- Wartung
- Logout (fu7config)

Tags konfigurieren


Liste erkannter Tags

Tag-ID	Name	Station	Batterie	Aktualisierung	Löschen
982989	Zimmer 1	Station Funk	ok	15.12.2015	
928596	Zimmer 2	Station Funk	ok	15.12.2015	

Anlernmodus

neue Tags anlernen 

- Die Einstellungen unter **Externe Systeme / Funkruf / Allgemeine Einstellungen** sollten nicht verändert werden.

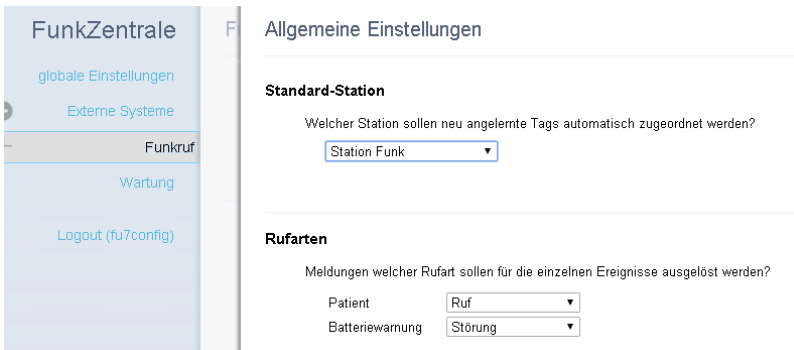

FunkZentrale

- globale Einstellungen
- Externe Systeme
- Funkruf**
- Wartung
- Logout (fu7config)

Allgemeine Einstellungen

Standard-Station

Welcher Station sollen neu angelernte Tags automatisch zugeordnet werden?

Rufarten


Meldungen welcher Rufart sollen für die einzelnen Ereignisse ausgelöst werden?

Patient:

Batteriewarnung:


4. Weitere Funktionen

- Über das Menü **globale Einstellungen / Netzwerkeinstellungen** kann die IP-Adresse der FU7-Zentrale an die Gegebenheiten im Haus angepasst werden.



The screenshot shows the 'FunkZentrale' web interface. On the left is a navigation menu with options: 'globale Einstellungen', 'Externe Systeme', 'Funkruf', 'Wartung', and 'Logout (fu7config)'. The main content area is titled 'globale Einstellungen' and contains sections for 'Spracheinstellungen', 'Netzwerkeinstellungen der Systemsteuerzentrale', and 'Datums- und Uhrzeiteinstellungen'. Under 'Netzwerkeinstellungen der Systemsteuerzentrale', there are four input fields: 'Externe IP-Adresse' (192.168.0.220), 'Netzmaske' (255.255.255.0), 'Standardgateway' (192.168.0.254), and 'DNS-Nameserver' (empty). A green arrow points to the 'Externe IP-Adresse' field.

- Über das Menü **Wartung / Datensicherung erstellen** können die eingegebenen Daten direkt auf den angeschlossenen PC gesichert werden und im Bedarfsfall wieder eingespielt werden.



The screenshot shows the 'FunkZentrale' web interface with the 'Wartung' menu item selected in the left navigation bar. The main content area is titled 'Datensichern und Wiederherstellen' and contains a section for 'Datensicherung' with a button labeled 'Datensicherung erstellen'.


5. Bearbeitung von Funkmeldungen

- Für die Signalisierung und Abstellung von Funkmeldungen kann an die FU7-Zentrale über den Stationsbus ein ZT7 angeschlossen werden.
(Zur Wandmontage oder wie im Bild mit Tischpult)



- Durch Druck auf das Display gilt die Meldung als erkannt und wird quittiert.


- Alternativ können Funkmeldungen auch über unsere Terminal-Anwendung im Browser bzw. über den DZT7-Monitor bearbeitet werden.

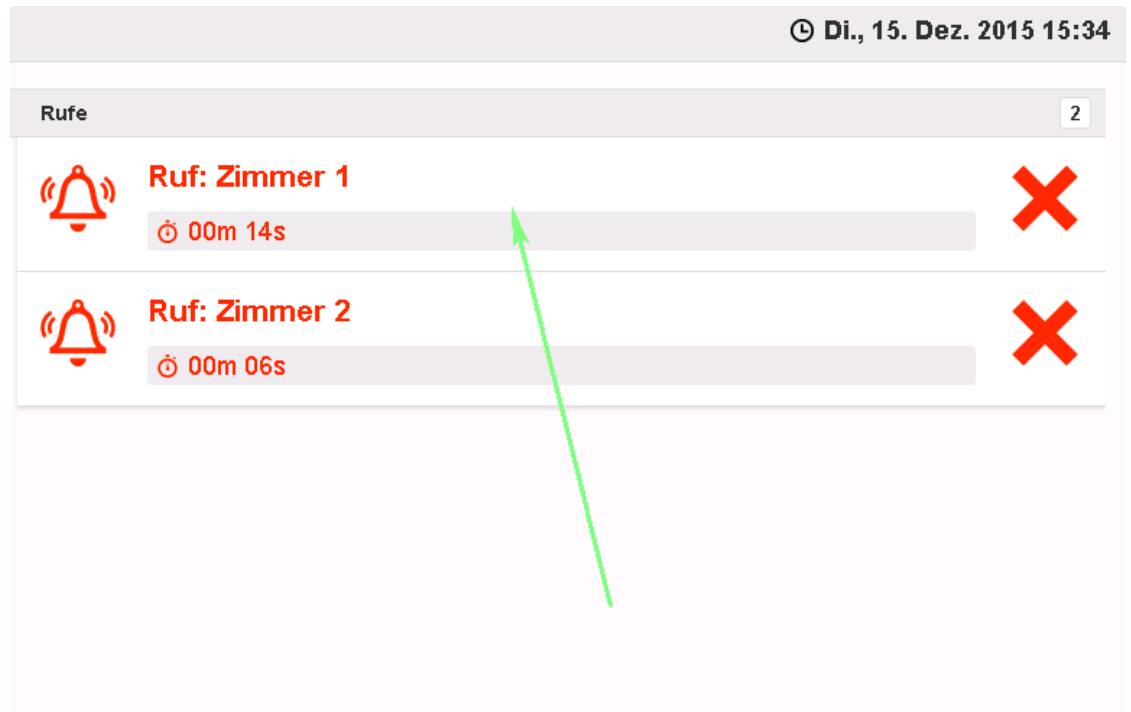


- Durch Mausklick auf die Anzeige im Browser ist die Meldung quittiert.

6. Protokollierung

- Alle Funkmeldungen und Abstellung von diesen werden im hospicall Rufsystem protokolliert und gespeichert und können über die Terminal-Anwendung im Browser ausgewertet werden.

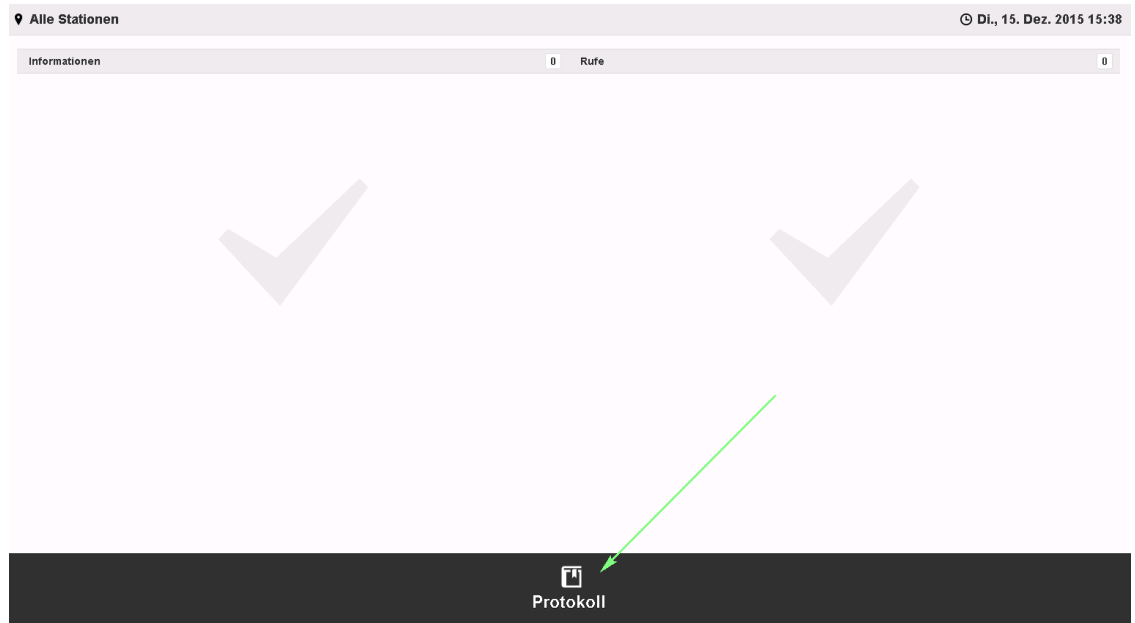

- Auswertung der Meldungshistorie:

 **Protokoll**
✕

+
Neue Suche

Status	Zeitpunkt	Rufart	Info	Station
Dienstag, 15.12.2015				
✕	15:34:51 🕒 04m:12s	Ruf	Zimmer 2	Station Funk
✕	15:34:43 🕒 04m:17s	Ruf	Zimmer 1	Station Funk

- Durch die Auswahl **Neue Suche** und einen Mausklick auf den Download-Button erhält man die Meldungshistorie direkt für den ausgewählten Zeitraum als Datei im PDF-Format auf den angeschlossenen PC.

☰ Neue Suche

🔍 Suchtext

Zeitraum	Rufartgruppe	Station
von: 15.12.2015	bis: 15.12.2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Dauer ermitteln		

