

PRODUKTDATENBLATT

Hersteller:	hospicall
Produkt:	SafePlug Mehrfachtaster mit ELA-Audiosteuerung
Artikelnummer:	300380
Kurzbezeichnung:	MT-M-ELA
Verwendung:	Rufsystem P7



Anwendung:

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

hospicall SafePlug Handgeräte für Magnetsteckverbindungen sind besonders sichere Bediengeräte am Patienten-/Bewohnerbett. Der innovative Steckverbinder reduziert das Beschädigungsrisiko an der Rufanlageninstallation und den angeschlossenen Bedieneinheiten erheblich.

Im eingesteckten Zustand sorgen Magnetkraft und federnd gelagerte Präzisionskontakte für eine sichere Verbindung. Überschreitet die Zugkraft an der Schnur einen definierten Wert (> 20 N) oder wird der Stecker in einen unzulässigen Winkel gebracht, z. B. durch Bewegungen des Patientenbetts, löst sich der Stecker aus der Wandeinheit. Damit wird eine Beschädigung der Geräte/Installation wirksam verhindert – auch bei unsachgemäßer Handhabung. Eine entsprechende Meldung in der Rufanlage stellt sicher, dass eine daraus resultierende Funktionsstörung gemeldet und protokolliert wird. Besonders erwähnenswert ist die antibakterielle Oberfläche, die gestiegene hygienische Anforderungen berücksichtigt.

Hinweis: Die Stecker der SafePlug Handgeräte selbst enthalten keine Magnete und sind deshalb auch für Personen mit implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren oder ähnlichen Implantaten unkritisch.

SafePlug Mehrfachtaster MT-M-ELA für Magnetstecksystem mit großer transluzenter, vertieft eingebauter und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützter Ruftaste. Mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, zwei Lichttasten gelb mit Lampensymbol zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über Stromstoßrelais, Tasten P + und P – (grün) für Programmwahl, Tasten + und – (blau) zur Tonsteuerung, eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss sowie Anschlusschnur 3 m mit Stecker für das SafePlug Magnetstecksystem (NSM).

Funktionen:

- **Ruf-/Notrufauslösung** über die große transluzente Ruftaste mit Pflegedienstsymbol rot, ähnl. RAL 3000, mit Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- **Programmwahl** über 2 Funktionstasten (P +/P -) grün, ähnlich RAL 6016, sowie Anzeige des gewählten Kanals durch 7 Status-LEDs
- **Lautstärkeregelung** eines angeschlossenen Kopfhörers (Klinkenbuchse 3,5 mm) mit 2 Tasten (+/-) blau, ähnl. RAL 5010
- **Automatischer Steckerabwurf** bei unzulässiger Zug- und Knickbelastung (> 20 N) des Steckers durch Verwendung des SafePlug Magnetstecksystems, Anschlusschnur 3 m (Bruchlast > 200 N)

Empfohlenes Zubehör:

- **Bettgalgenclip** zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- **Wandhalter** WH-BT, Art. Nr. 310446
- **Audio-Isolator** Art. Nr. 300855 zur sicheren elektrischen Trennung (2 x MOPP gem. DIN EN 60601-1)

Zum Anschluss an Magnetsteckkontakt (NSM).**Technische Daten**

Maße (H x B x T):	120 mm x 46 mm x 22 mm
Länge:	Anschlusschnur 3.000 mm
Gewicht:	180 g
Material:	ABS
Farbe:	weiß, ähnl. RAL 9010
Betriebsspannung:	12V
Stromaufnahme:	aktiv 19 mA, passiv 7 mA
Schutzklasse:	IP40