

PRODUKTDATENBLATT

Hersteller:	hospicall
Produkt:	SafePlug Ruftaster mit Diagnostiksteckkontakt und Ton für Trilux Bettenleuchten
Artikelnummer:	300853
Kurzbezeichnung:	RT-NSM-DIA-TON-MV
Verwendung:	Rufsystem P7



Anwendung:

Die hospicall SafePlug Rufeinheit in Magnettechnik ist die sichere Anschluss- und Bedieneinheit am Patienten-/Bewohnerbett. Der innovative Magnetsteckverbinder reduziert das Beschädigungsrisiko an der Rufanlageninstallation und den angeschlossenen Bedieneinheiten erheblich. Im eingesteckten Zustand sorgen Magnetkraft und federnd gelagerte Präzisionskontakte für eine sichere Verbindung. Überschreitet die Zugkraft an der Schnur einen definierten Wert oder wird der Stecker in einen unzulässigen Winkel gebracht, z. B. durch Bewegungen des Patientenbetts, löst sich der Stecker aus der Wandeinheit. Damit wird eine Beschädigung der Geräte/Installation wirksam verhindert – auch bei unsachgemäßer Handhabung. Eine entsprechende Meldung in der Rufanlage stellt sicher, dass eine daraus resultierende Funktionsstörung gemeldet und protokolliert wird.

SafePlug Rufeinheiten RT-NSM-DIA-TON-MV für den Einbau in die Trilux-Leuchten ES 403 oder Sanesca und zum Anschluss an den P7 Zimmerbus verfügen über eine Ruftaste rot und ein Finde-/Beruhigungslicht, einen Nebensteckkontakt in Magnettechnik (NSM) zum Anschluss von SafePlug Handgeräten mit optionaler Steuerung von zwei Lichtquellen und einen Eingang für TV-Ton* sowie einen Diagnostiksteckkontakt zum Anschluss von Zusatzgeräten wie hospicall Funkempfänger FU2 bzw. zur Aufschaltung von medizinischen diagnostischen Geräten über potentialfreie Schaltkontakte.**

Funktionen:

- Zimmerbuseinheit mit Schraub-Steck-Klemmen und zweiteiligem Adressaufkleber für einfache Konfiguration
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste mit Pflegedienstsymbol rot, ähnl. RAL 3000, mit Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Magnet-Anschlussbuchse SafePlug als Nebensteckkontakt (NSM) für passende hospicall P7 Handgeräte
- Automatischer Steckerabwurf bei unzulässiger Zug- und Knickbelastung des Steckers (> 20 N) durch Verwendung des SafePlug Magnetstecksystems
- Anschlussmöglichkeit zur Steuerung von zwei Lichtquellen über Stromstoßrelais
- Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen in Verbindung mit passenden Handgeräten
- Steuerung und Wiedergabe von TV-Ton* in Verbindung mit passenden Handgeräten

- Anschluss von Zusatzgeräten wie hospicall Funkrufempfänger FU2 bzw. zur Aufschaltung von medizinischen diagnostischen Geräten über potentialfreien Diagnostiksteckkontakt (Modular 4P4C).**

Hinweise:

*Zur sicheren Einspeisung des TV-Tons ist der Audio-Isolator Art. Nr. 300855 vorzusehen. Zur Steuerung und Wiedergabe eignen sich die z. B. die Mehrfachtaster MT-M TON, Art. Nr. 300370, bzw. MT-TON-NC, Art. Nr. 300372.

**Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise in der Produktdokumentation oder auf unserer Website unter „Hinweise zur Nutzung von Neben- und Diagnostiksteckkontakten“.

Technische Daten:

Maße (H x B x T):	80 mm x 63 mm x 30 mm
Material:	PA/PC
Montage-Art:	Einbau in die Trilux-Leuchten ES 403 oder Sanesca
Farbe Abdeckplatte:	weiß, ähnlich RAL 9010
Betriebsspannung:	12 V DC
Stromaufnahme:	aktiv 48 mA, passiv 8 mA
Schutzklasse:	IP20

Elektrische Schnittstellen:

- 1 x P7 Zimmerbus
- 1 x P7 DIA - Modular 4P4C
- 1 x TON – Schraub-Steck-Klemme
- 2 x Ausgang analog – Schraub-Steck-Klemme für Lichtsteuerung
- 1 x P7 NSM – SafePlug Magnetstecksystem