


## Mehrfachtaster MT-RT-ELA-2LT-NSE

Datenblatt-Nr.: 310480 / Stand: 2026/04/24

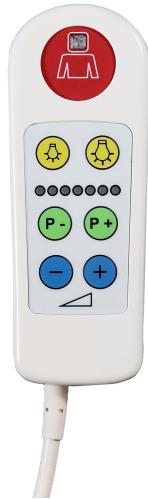

---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Mehrfachtaster MT-RT-ELA-2LT-NSE

---

**Artikelnummer:** 310480

---

**Bezeichnung neu:** Mehrfachtaster MT-RT-ELA-2LT-NSE

---

**Kurzbeschreibung neu:** MT-RT-ELA-2LT-NSE

---

**Bezeichnung alt:** Patienten-Handgerät mit Ruftaste, 2 Lichttasten, 2 ELA-Kanalwahltasten, 2 Lautstärketasten, Klinikenbuchse für Kopfhöreranschluss sowie incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss

---

**Kurzbeschreibung alt:** MT-ELA

---

**Verwendung:** Rufsystem P7

---

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Mehrfachtaster MT-RT-ELA-2LT-NSE sind die komfortablen Handgeräte im Patienten-/Bewohnerumfeld und verfügen über eine große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Ruftaste mit integriertem Finde-/Beruhigungslicht, eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur mit zwei Lichttasten gelb zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über ein Stromstoßrelais. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgen über Wandeinheiten mit Nebensteckkontakt (NSE).

### Funktionen

- Anschlussschnur drei Meter, mit Schutzadapter und Anschlussstecker für Nebensteckkontakt

- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Folientastatur, Tasten mit eindeutigem Druckpunkt
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol und Status-LED rot
- Steuerung von zwei Lichtquellen über Tasten gelb, mit Lampensymbolen für Raumlicht und Betten-/Leselicht
- Programmwahl über zwei Funktionstasten grün (P+/P-) sowie Anzeige des gewählten Kanals 1-6 durch Status-LEDs
- Audiowiedergabe (mono) über Kopfhörer, Anschluss an Klinkenbuchse 3,5 mm
- Lautstärkeregelung eines angeschlossenen Kopfhörers mit zwei Tasten blau (+/-)
- Zerstörungsfreier Steckerabriss bei unzulässiger Zugbelastung der Anschlusschnur durch selbstlösenden Schutzadapter
- Empfohlenes Zubehör:
  - Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
  - Wandhalter, Art. Nr. 310447
  - Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker, Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

#### Technische Daten

Versorgungsspannung: 12-24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 24 mA, passiv: 7 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 180 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an: NSE

Zum Anschluss von:

#### Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 120 x 46 x 22 mm

Gewicht netto: 180 g

Material: ABS

Montage:

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

#### Elektrische Schnittstellen:

-