

Rufeinheiten RE-RT-AT-NSA

Datenblatt-Nr.: HP70575 / Stand: 2025/10/28



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Rufeinheiten RE-RT-AT-NSA

Artikelnummer: HP70575

Bezeichnung neu: Rufeinheit RE-RT-AT-NSA

Kurzbeschreibung neu: RE-RT-AT-NSA

Bezeichnung alt: Rufeinheit mit Ruftaste, Finde-/Beruhigungslicht rot, Abstelltaste grün optional konfigurierbar als Anwesenheitstaster (mit Status LED sowie Summer für Rufnachsendung), Nebensteckkontakt (Modular 8P8C) optional mit Sprachkommunikation

Kurzbeschreibung alt: RE-RT-AT-NSA

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Geräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik. Die hospicall Rufeinheiten passen in Standard-UP-Einbaudosen nach DIN 49073 und zu vielen Schalterprogrammen.

Rufeinheiten RE-RT-AT-NSA sind die sicheren Rufeinrichtungen im Patienten-/Bewohnerumfeld und verfügen über eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur, eine Ruftaste rot mit Finde-/Beruhigungslicht sowie einen Nebensteckkontakt zum Anschluss von Handgeräten mit optionaler Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen, Sprachoption über einen anschließbaren Lautsprecher für freies Sprechen am Bett oder diskretes Sprechen über ein entsprechendes Patientenhandgerät sowie einen Abstelltaster grün zur selektiven Rufabstellung. Der Systemanschluss erfolgt über den Zimmerbus und die Funktionsüberwachung durch das übergeordnete Modul oder Terminal.

Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß



Funktionen

- Einfache Montage und Installation am Zimmerbus durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit und zweiteiligem Adressaufkleber für einfache Konfiguration
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur mit erhabenen Tasten und eindeutigem
 Druckpunkt für eine sichere Bedienung
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Nebensteckkontakt (NS Modular 8P8C); darüber Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen in Verbindung mit entsprechenden Handgeräten
- Anschlussmöglichkeit zur Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen über Stromstoßrelais
- Abstelltaste grün, ähnl. RAL 6018, für separate (bettenweise) Rufabstellung, optional konfigurierbar als Anwesenheitstaste mit Status-LED grün sowie akustischer Rufnachsendung durch konfigurierbaren integrierten Schallgeber
- Sprachkommunikation über Mikrofon und optional anschließbare Lautsprechereinheit für freies Sprechen am Bett oder diskretes Sprechen über ein entsprechendes Patientenhandgerät
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 12 V DC	Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm
Stromaufnahme aktiv: 48 mA, passiv: 8 mA	Gewicht netto: 46 g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: 46 g	Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	49073
Befestigung: rasten, schrauben	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Zum Anschluss an: ZB	
Zum Anschluss von:	



Elektrische Schnittstellen:

- 1x Nebensteckkontakt NS Modular 8P8C SK Bidirektional
- 1x Sprachkommunikation Modular 8P8C Z-Bus P7 Bidirektional