

Rufeinheiten RE-RT-NSE

Datenblatt-Nr.: HP71845 / Stand: 2026/05/12



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Rufeinheiten RE-RT-NSE

Artikelnummer: HP71845

Bezeichnung neu: Rufeinheit RE-RT-NSE

Kurzbeschreibung neu: RE-RT-NSE

Bezeichnung alt: Rufeinheit mit Ruftaste, Finde-/Beruhigungslicht rot, Nebensteckkontakt (Modular 8P8C), optional ELA-Steuerung in Verbindung mit ELA -Anschlusseinrichtung

Kurzbeschreibung alt: RE-RT-NSE

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Geräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik. Die hospicall Rufeinheiten passen in Standard-UP-Einbaudosen nach DIN 49073 und zu vielen Schalterprogrammen.

Rufeinheiten RE-RT-NSE sind die sicheren Rufeinrichtungen im Patienten-/Bewohnerumfeld und verfügen über eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur, eine Ruftaste rot mit Finde-/Beruhigungslicht sowie einen Nebensteckkontakt zum Anschluss von Handgeräten für die optionale Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen, Lautstärkeregelung und Selektion aus fünf ELA-/TV-Ton- Kanälen (Anschluss über das zugehörige ELA-Anschlussgerät als 2fach Kombination). Die Wiedergabe und Steuerung erfolgt über geeignete Mehrfachtaster. Der Systemanschluss erfolgt über den Zimmerbus und die Funktionsüberwachung durch das übergeordnete Modul oder Terminal.

Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß

Funktionen

- Die Montage erfolgt in Standard UP-Doppeldosen (tiefe Bauform), zusammen mit Anschlusseinrichtung für ELA
- Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Folientastatur, Tasten mit eindeutigem Druckpunkt
- Zentralplatten passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol und Status-LED rot
- Anschlussmöglichkeit zur Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen über Stromstoßrelais
- Nebensteckkontakt zum Anschluss von flexiblen Handgeräten
- Steuerung von fünf ELA- und einem TV-Ton-Kanal über geeignete Mehrfachtaster
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 48 mA, passiv: 8 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 46 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: ZB

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm

Gewicht netto: 46 g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Nebensteckkontakt NS - Modular 8P8C - SK - Bidirektional
- 5x ELA - Schraubklemme - analog - IN