


## Rufeinheiten RE-ZHK-AT

Datenblatt-Nr.: HP70685 / Stand: 2026/01/12

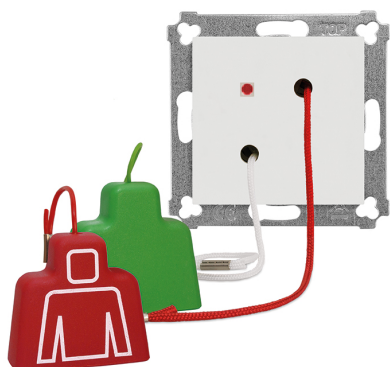

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Rufeinheiten RE-ZHK-AT

Artikelnummer: HP70685

Bezeichnung neu: Rufeinheit RE-ZHK-AT

Kurzbeschreibung neu: RE-ZHK-AT

Bezeichnung alt: Rufeinheit als Zugtaster mit Zugschnur Wickler und Knauf rot zur Rufauslösung und Zugschnur mit Knauf grün zur Rufabstellung

Kurzbeschreibung alt: RE-ZHK-AT

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Geräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik. Die hospicall Rufeinheiten passen in Standard-UP-Einbaudosen nach DIN 49073 und zu vielen Schalterprogrammen.

Rufeinheiten RE-ZHK-AT sind die sicheren Rufeinrichtungen für Bewohner / Patienten im Sanitärbereich. Die Montage erfolgt oberhalb des höchsten Wasseraustritts in Standard UP-Dosen (tiefe Bauform) und die farbig codierten Schraub-/Steckklemmen ermöglichen eine einfache und fehlerfreie Installation am Zimmerbus. Die Zentralplatten (passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten) verfügen über eine hygienische, leicht zu reinigende und antibakterielle Folienoberfläche mit einer 2100 mm langen roten Zugschnur, Haken und rotem Knauf mit Pflegesymbol sowie Zugschnur 600 mm lang mit Knauf grün zur Rufabstellung. Für eine sichere Bedienung kann die Zugschnur für die Rufauslösung mittels beiliegendem Schnurwickler so eingekürzt werden, dass sie auch von auf dem Boden liegenden Personen leicht erreichbar ist. Die Einheit verfügt über ein Finde-/Beruhigungslicht rot (schwach leuchtend) im Ruhezustand und (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung. Der Zentraleinsatz wird verschraubt und ist auch für die Deckenmontage geeignet.

Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß

## Funktionen

- Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen in Standard UP-Dosen (tiefe Bauform), oberhalb des höchsten Wasseraustritts
- Für Deckenmontage geeignet
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Oberfläche
- Zentralplatten passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten
- Ruf-/Notrufauslösung durch Zugtaster mit Zugschnur und Knauf rot mit Pflegedienstsymbol, Status-LED rot
- Zugschnur rot, 2100 mm lang, Polyester ummantelt mit PVC, antibakteriell, Bruchlast: < 20daN
- Schnurwickler zur optimalen, reversiblen Anpassung der Rufschnurlänge
- Zugschnur (weiß an der Einheit) grün, mit Knauf grün zur selektiven Rufabstellung
- Zugschnur grün, 800 mm lang
- Zubehör:
- Dichtflansche (ZUB-DF-UP) zur Verbesserung des Feuchtigkeitsschutzes bei ungünstigen Montageumgebungen (unebene Untergründe, Fugen etc.)
- Alternative Zugschnur mit besonderem Strangulierschutz (Abrisskraft kleiner 10daN), Art. Nr. 310099
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

## Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 23 mA, passiv: 3 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 46 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: ZB

Zum Anschluss von:

## Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm

Gewicht netto: 46 g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

#### Elektrische Schnittstellen:

-