

Sicherheitshinweis




Aus Gründen der Sicherheit und zur Vermeidung von Erdschlussbildung bei der Montage im 19" Schrank, empfehlen wir: den Isolator Art.Nr.: 320910 für den Einbauwinkel Art.Nr.: 320900 zu verwenden.

Hutschienenkomponenten auf den isolierten Einbauwinkel montieren.

Ein Mindestabstand von 1 cm zu benachbarten Geräten ist einzuhalten!




hospicall GmbH
Martin-Siebert-Straße 1
51647 Gummersbach
Tel +49 2261 9583-100
www.hospicall.com

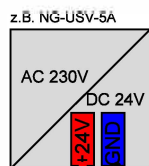

Sicherungsset 400567 ist im Lieferumfang enthalten und Bauseits zu installieren !

SZ_P7 Typ 5
300012

Achtung!
Auf richtige Polarität achten!

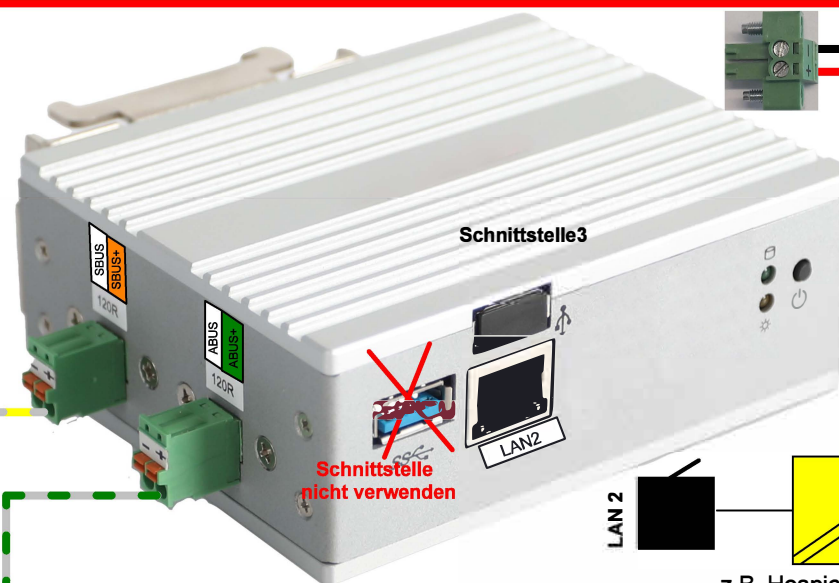


SZ_AU_P7 Typ5
300112

LAN 2

z.B. Hospicall Ethernet Trenner
300022

PC-Konfiguration
(bauseits)

Konfiguration der Zentrale über LAN 2:
IP-Adresse LAN 2: 192.168.0.220

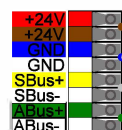

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung: Montage Elektroinstallation einer Stationszentrale als autarkes System P7 Typ5	Blattzahl:
Rev	Datum	Name	gez.:			1
			gepr.:		Zeichnungs-Nr.: 240632D	Blatt-Nr.: 1
3	10.02.2021	J. Böhm				
2	31.08.2020	J. Böhm				

