

Ein Qualitätsprodukt von



Sensor Pad Inbetriebnahme

1.



Sensor-Pad platzieren

2. In Diagnostiksteckkontakt der Rufanlage einstecken



3.



In Bett einsteigen

4.

Blinken abwarten!

10 – 30 Sekunden

Bei Blinken:

Alarmierung ist noch inaktiv!

5.

Auf Dauerleuchten warten!

40 – 60 Sekunden

Erst ab Dauerleuchten:

Bett-Exit Alarm ist aktiv


300929_Sensorpad_ZUB-SP-DIA_HC_IFU000003_Issue_B

Sensor Pad - Einstellungen



Alarmierungsmodus ändern

Knopf 6 Sek. halten

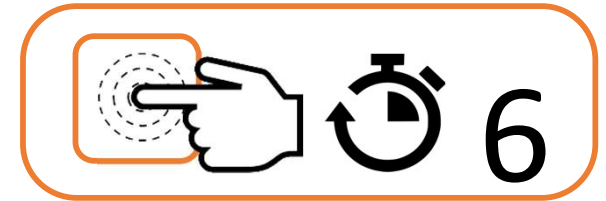

Alarmierung de-/aktivieren

Knopf doppelklicken



Status-LED					
Modus	Früh Blau	Sofort Grün	Verzögert Gelb	Kalibrierung Violett	Deaktiviert Rot